



Come utilizzare la ScanBox^{pro}

6/ Tocca due volte lo schermo per avviare la scansione e ascolta attentamente le istruzioni dell'app



SÌ

Ricordati di fare movimenti molto ampi, da un lato all'altro, in modo che tutti i tuoi denti, compresi quelli in fondo alla bocca, siano visibili.

Fai dei movimenti ben centrati; solo la ScanBox^{pro} e il cellulare devono muoversi, non la tua testa.

Muovi la ScanBox^{pro} alla stessa velocità della freccia sullo schermo del tuo smartphone.

NO

Non mettere la lingua davanti ai denti.

7/ Ascolta attentamente le istruzioni per l'app

Le seguenti posizioni possono essere richieste a seconda del trattamento seguito:



Bocca leggermente aperta

Ciò significa che devi lasciare uno spazio di circa un dito tra i denti superiori e inferiori.



Bocca chiusa

Ciò significa che devi mordere ma tenere le labbra separate in modo che i denti superiori e inferiori siano visibili.



Bocca spalancata

Ciò significa che devi aprire la bocca il più possibile, senza allentare l'Apribocca.

Controlla attentamente le tue scansioni. Se le immagini non corrispondono alle istruzioni sullo schermo, puoi rifarle di nuovo. Una volta che tutte le immagini sono state convalidate, puoi inviare la scansione.

4 / Inserisci l'Apribocca nel supporto del telefono

SÌ

Inserisci l'Apribocca nel supporto del telefono. Sentirai un clic quando è posizionato correttamente.



NO

Non utilizzare più Apribocca.

Non inserire il lato sbagliato dell'Apribocca nel supporto del telefono.



5 / Inserisci l'Apribocca in bocca



SÌ

Inserisci l'Apribocca da un lato e poi dall'altro. I denti e le gengive devono essere chiaramente visibili e non devi sentire alcun dolore.




NO

Non mordere l'Apribocca: il suo scopo è quello di tenere le labbra lontane dai denti.

Non lasciare l'Apribocca fuori dalla bocca. È necessario inserirlo prima di iniziare la scansione.

Per qualsiasi domanda su DentalMonitoring o sulle scansioni, contatta il tuo medico e il suo team perché ti conoscono e sanno esattamente come sta procedendo il tuo trattamento. Puoi inviare loro un messaggio tramite la tua app. FPer qualsiasi domanda tecnica sull'app, il nostro servizio di assistenza DentalMonitoring è disponibile per aiutarti. Contattaci tramite il seguente indirizzo: support@dental-monitoring.com

1/ Avvia l'app DM

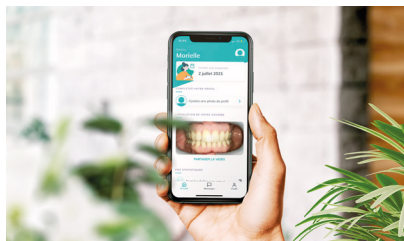

Prima di ogni scansione, ricordati di lavare le mani accuratamente con acqua e sapone.

Posizionati davanti a uno specchio, apri l'app DM e assicurati che lo smartphone non sia in modalità silenziosa.

2/ Utilizza un Apribocca della dimensione adatta alla tua bocca

SÌ

Utilizza sempre un Apribocca della dimensione adatta alla tua bocca.

NO

Non utilizzare un Apribocca troppo piccolo, poiché non sarà possibile vedere tutti i denti.

Non utilizzare un Apribocca troppo grande perché potresti rischiare di farti male.

3/ Inserisci lo smartphone nel supporto



SÌ

Tieni il supporto del telefono con il marchio DM inciso di fronte a te.

Apri il braccio del supporto premendo il pulsante sul lato e posiziona la parte posteriore dello smartphone, senza il coperchio protettivo, contro il supporto, in modo che il flash e l'obiettivo della fotocamera siano allineati con la finestra.

Chiudi il braccio del supporto con forza in modo che lo smartphone sia fissato saldamente e non possa cadere.

Regola la finestra facendo scorrere il supporto verticalmente fino a che l'obiettivo e il flash dello smartphone sono centrati. Per fare questo, tieni premuto il pulsante di regolazione.



NO

Non inserire lo smartphone al contrario.





Scopri la tua ScanBox^{pro}


Supporto

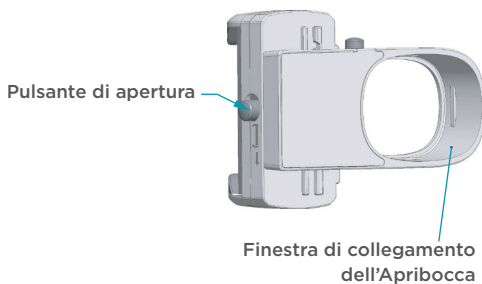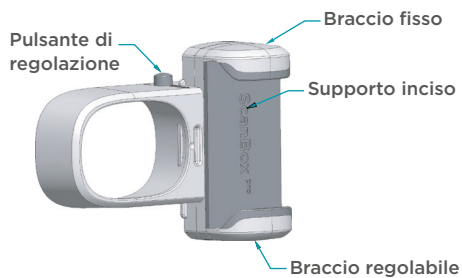


Apribocca

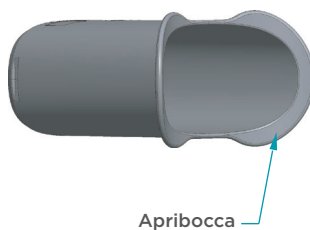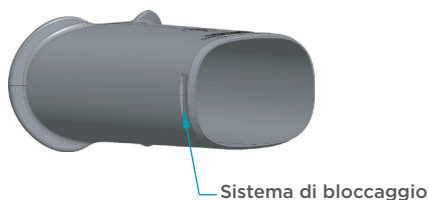

Vista frontale della ScanBox pro dopo il collegamento allo smartphone

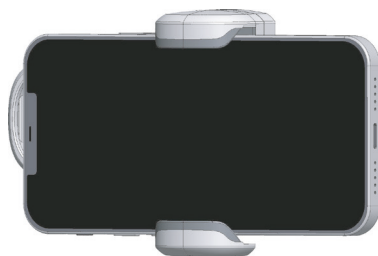

Vista posteriore della ScanBox pro dopo il collegamento allo smartphone

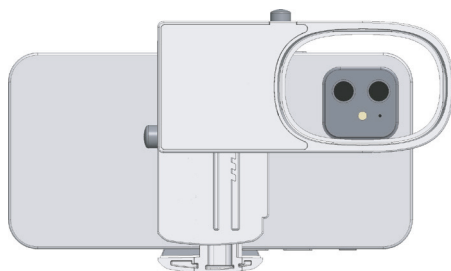



L'app DentalMonitoring è disponibile su App Store o Google Play.



DentalMonitoring è un prodotto progettato e realizzato da Dental Monitoring SAS con il marchio DentalMind® per i professionisti della salute (PS). Viene anche usato dai pazienti sotto la supervisione medica di professionisti del settore sanitario. DentalMonitoring è progettato per aiutare il PS ad osservare a distanza situazioni intraorali e trattamenti ortodontici. Consultare il proprio SP e/o le Istruzioni per l'Uso prima dell'uso. DentalMonitoring è un dispositivo medico (solo in Europa), registrato come tale e con il marchio CE. La disponibilità, i reclami e la situazione dei prodotti possono variare da paese a paese a seconda delle normative locali. Contattate il vostro rappresentante locale per ulteriori informazioni.