

# So verwenden Sie Ihre richtig ScanBox pro

## / Tippen Sie zwei Mal auf den Bildschirm, um den Scan zu starten, und achten Sie genau auf die Anweisungen der App.





### DOS

Führen Sie weite Bewegungen aus. Führen Sie Beim Scannen weite Bewegungen aus von einem Ohr zum anderen, um sicherzustellen, dass alle Zähne, auch die hinteren, gescannt werden.

Ihre Bewegung sollte zentriert bleiben; nur Ihre ScanBox pro und Ihr Handy bewegen sich, nicht Ihr Kopf.

Ihre Bewegung sollte der Geschwindigkeit des Fortschrittbalkens auf dem Bildschirm Ihres Smartphones folgen.

### DON'TS

Strecken Sie die Zunge nicht vor Ihre Zähne.

# / Achten Sie genau auf die Anweisungen der App

Folgende Positionen können als zusätzliche Scans verlangt werden:



Mund leicht geöffnet Mund geschlossen Das bedeutet, dass Sie zwischen den oberen und unteren Zähnen etwa einen Fingerbreit frei lassen sollten.



Das bedeutet, dass Sie die Zähne zusammenbeißen sollten, dabei die Lippen jedoch öffnen sollten, ohne das auseinanderspreizen, so dass Ihre oberen und unteren Zähne sichtbar sind.



Mund weit geöffnet Das bedeutet, dass Sie Ihren Mund so weit wie möglich Wangenhalterrohr loszulassen.

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um Ihre Scans zu überprüfen. Wenn Ihre Bilder nicht den Anweisungen auf dem Bildschirm entsprechen, können Sie sie einfach erneut aufnehmen. Sobald alle Ihre Bilder überprüft sind, können Sie Ihren Scan absenden.

## / Setzen Sie das Wangenhalterohr in die Smartphone-Halterung ein

## **DO'S**

Befestigen Sie das Wangenhalterrohr an der Smartphone-Halterung. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn es richtig befestigt ist.

### **Don'ts**

Versuchen Sie nicht, mehr als ein Wangenhalterrohr zu verwenden.

Versuchen Sie nicht, das falsche Ende des Wangenhalterrohrs mit der Smartphone-Halterung zu verbinden.





# 5/ Führen Sie das Wangenhalterohr in Ihren Mund ein



## **DO'S**

Führen Sie das Wangenhalterrohr zuerst mit der einen, dann mit der anderen Seite in Ihren Mund ein. Zähne und Zahnfleisch sollten vollständig sichtbar sein, ohne dass Sie sich unwohl fühlen.



## **DON'TS**

Beißen Sie nicht auf das Wangenhalterrohr. Er sollte Ihre Lippen von den Zähnen fernhalten.

Halten Sie das Wangenhalterrohr nicht außerhalb Ihres Mundes. Sie müssen den Wangenhalter einführen, bevor Sie mit dem Scannen beginnen.

Wenn Sie Fragen zu DentalMonitoring oder zum Scanvorgang haben, wenden Sie sich über die DentalMonitoring App an Ihren Arzt oder das Praxisteam. Sie kennen Ihren aktuellen Behandlungsverlauf genau. Bei technischen Fragen zur App steht Ihnen auch das DentalMonitoring Supportteam gerne zur Verfügung. Sie können sich über folgende E-Mail-Adresse an uns wenden: support@dental-monitoring.com

## / DM App starten



## Waschen Sie sich vor jedem Scan die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Stellen Sie sich vor einen Spiegel, starten Sie die DM App und vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone nicht stummgeschaltet ist.

## Verwenden Sie einen Wangenhalter mit einem Rohr, das Ihrer Mundgröße entspricht

### **DO'S**

Benutzen Sie immer einen Wangenhalter, der Ihrer Mundgröße entspricht. Wenn Sie sich unwohl fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **DON'TS**

Verwenden Sie kein zu kleines Wangenhalterrohr. Achten Sie darauf, dass alle Zähne sichtbar sind.

Verwenden Sie keinen zu großen Wangenhalter, das könnte zu Schmerzen oder Verletzungen führen

# **Setzen Sie Ihr Smartphone in die Halterung**



## DOS

Halten Sie die Smartphone-Halterung so, dass die DM-Gravur zu Ihnen zeigt.

Öffnen Sie die Klemmbacken der Halterung, indem Sie die seitliche Öffnungstaste drücken, und legen Sie Ihr Smartphone mit der Rückseite (ohne Abdeckung oder Hülle) so an die Halterung, dass der rückwärtige Blitz und das Objektiv an dem Fenster ausgerichtet sind.

Drücken Sie fest auf die Klemmbacke, um Ihr Smartphone zu fixieren, und vergewissern Sie sich, dass es fest sitzt. Stellen Sie die Position des Fensters ein, indem Sie den Einstellknopf gedrückt halten und die Halterung vertikal so weit verschieben, bis Sie das Objektiv und den Blitz durch das Fenster sehen können.

## **DON'TS**

Setzen Sie Ihr Smartphone nicht verkehrt herum ein.



•----

## Entdecken Sie die ScanBox pro


## **Smartphone-Halterung**




## Wangenhalterrohr



Vorderansicht der ScanBox pro nach Anschluss an das Smartphone.

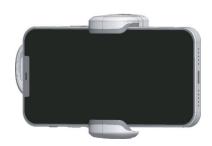

Rückansicht der ScanBox pro nach Anschluss an das Smartphone.

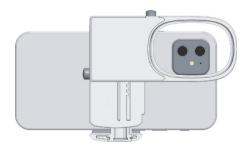



Die DentalMonitoring App ist im App Store oder bei Google Play erhältlich.



